


Gebruik rolstoelverankeringen en riemen in de citroënbus

- ✓ De **veiligste manier** van personen vervoer is nog steeds op de **zetel**. Wie niet in een rolstoel moet zitten ivf vervoer neemt steeds plaats in een zetel.
- ✓ Indien de persoon in zijn **rolstoel** moet blijven zitten moet de verankering **altijd** op een correcte manier gebeuren dwz: **4 verankeringspunten** en de **personengordel** van de bus. (de gordelplicht blijft!)

Gebruik van de lift:

- Draai de **oranje knop (A)** rechts naar beneden zodat de **knipperlichten (B)** op de lift aangaan.
- Duw steeds **eerst omhoog** met de lift zodat deze terug op druk komt. Hierdoor komt de lift uit **de haak**. Controleer dit steeds ook visueel. (C)
- Plaats de rolstoel op de lift en zet de **remmen** van de rolstoel (D) op.

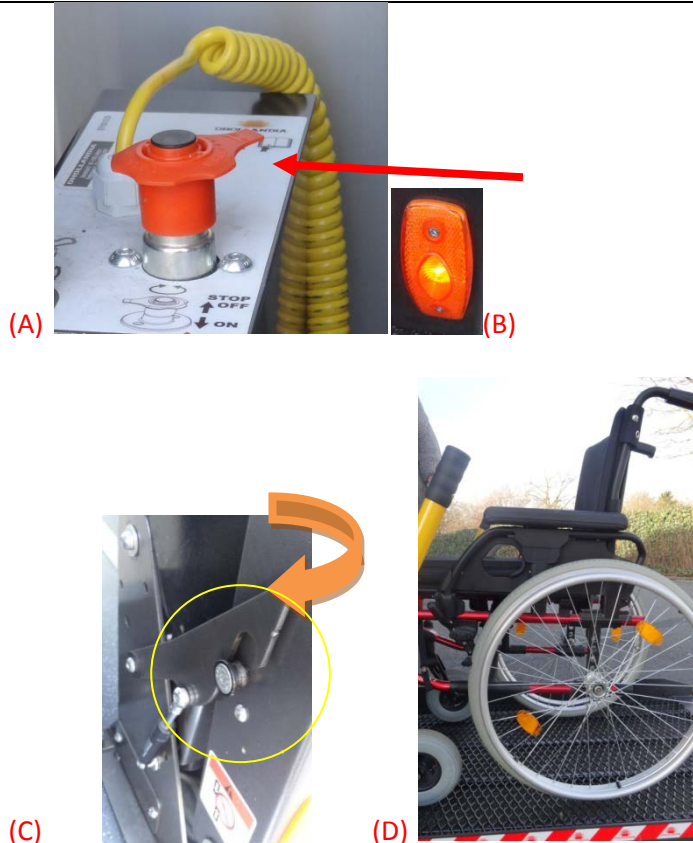

Openklappen van de stoelen:

1. **Zitting:** draai de rode hendel (1) weg van je en begeleid de zitting mee naar beneden. De hendel moet terug naar boven klikken.
2. **Rugleuning:** duw op de zwarte hendel aan de zijkant van de zitting (2)
3. **Hoofdsteun:** Draai aan de zwarte knop bovenaan (3) om de hoofdsteun op de juiste plaats te brengen. Draai nogmaals om de hoofdsteun uit te trekken.
4. **Gordel:** Neem de gordel van de magneet (4) en bevestig de langste kant in het slot aan de buitenkant van de bus.



Rolstoel verankering

Het gordel systeem

4 mogelijke plaatsen om de rolstoel correct in de bus te plaatsen.
Afhankelijk de plaats heb je bepaalde panelen nodig.

1. Panelen : opgeborgen in wand gebruik het **handvat (1)** om het paneel los te maken. (omhoog en open trekken)
2. Panelen: achteraan aan de lift. Draai aan het zwarte **hendeltje (2)** zodat het paneel loskomt. links naar boven en klap het paneel naar beneden.

3. vastzetten van panelen.
Gebruik de rode knop (3) om het paneel te bevestigen in de vloer van de bus. Duw de stang naar beneden in de cirkel en klik hem dan vast in het dunner gedeelte. .

4. losse haken



Rolstoel verankering

Afhankelijk waar je de rolstoel plaatst moeten volgende elementen reeds klaarstaan voor je de rolstoel in de bus rijdt.

- gordelpanelen openen of vastzetten.
- hoofdsteunen reeds in de goede richting draaien.

Rolstoel inrijden en vastzetten.

- positioneer de rolstoel tussen de twee panelen en zet de remmen op.
- Zet de rolstoel vast op de vier crashtest gekeurde punten. Deze zijn aangeduid met volgend symbool (1) indien dit niet duidelijk is, veranker steeds op het vaste frame.
- Gebruik de haken van het paneel aan de kant van de rolstoel. (2)
- Duw op het rode knopje (3) om de gordels te ontrollen. (bij de losse haken, rechts vooraan in de bus, de gordels ook opspannen met het wieltje)

Personengordel en hoofdsteun.

- **hoofdsteun:**
verschuif indien nodig de passagiersstoel met de grijze hendel (4) zodat de hoofdsteun aansluit bij de leuning van de rolstoel. Stel de hoofdsteun in zoals bij een stoel.

- **personengordel:**
Neem de onderste gordel van de magneet en klik deze in de gordelsluiting aan dezelfde kant van de zetel (buitenkant van de bus) (5)
Neem het tweede stuk aan de gordel en kruis dit over de passagier naar het tweede slot (6) op het paneel (binnenkant van de bus.)



(1)

